


**Türüberwachung**  
FN 6764/04 mit Funksender  
FN 6864/04 für Raumfunk

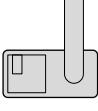

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschilds sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.  
  
Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Türüberwachung eingesetzt werden und wo nicht?**  
Auch bei geschlossenem Empfänger kann ein drahtgebundenes IMA-Gerät an die Rufeinheit angeschlossen werden, zum Beispiel:  
- Brintaster  
- Mehrfachbrintaster

**Die Türüberwachung ist für den Einsatz an Zimmertüren im trockenen Innenbereich bestimmt. Die Türüberwachung darf nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Türüberwachung verwendet?**  
Die Türüberwachung wird an eine Türklinke montiert. Sie sendet beim Herunterdrücken der Türklinke einen Ruf.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit:  
1 x Türüberwachung  
1 x Anleitung des Herstellers  
1 x Empfänger

**Sender anmelden**  
Zum Anmelden von Sendern muss der Empfänger an eine Rufeinheit angeschlossen sein.  
Gehen Sie für jeden einzelnen Sender wie folgt vor:

**Am Empfänger:**  
Am Empfänger:  
Die LED erlischt nach einigen Sekunden.  
An der Rufleinheit:  
Das rote Beruhigungslicht zeigt den Ruf an.  
Der Sender ist angemeldet.  
Setzen Sie den Ruf zurück.  
  
\*) Wenn die LED grün blinkt, ist die maximale Anzahl Sender bereits angemeldet. Es können keine weiteren Sender angemeldet werden.  
\*) Wenn die 10 Sekunden ungenutzt verstreichen, dann bricht der Vorgang ab. Beginnen Sie einfach von vorne.

**Wo darf der Empfänger eingesetzt werden und wo nicht?**  
Der Empfänger empfängt die Rufe eines zugehörigen Senders, zum Beispiel:  
- Drahtloser Brintaster (Armulett)  
- Drahtloser Pneumatiktaster  
- Trittmatte mit Funksender  
- Türüberwachung mit Funksender

**Wofür wird der Empfänger verwendet?**  
Der Empfänger empfängt die Rufe eines zugehörigen Senders, zum Beispiel:  
- Drahtloser Brintaster (Armulett)  
- Drahtloser Pneumatiktaster  
- Trittmatte mit Funksender  
- Drahtloser Pneumatiktaster

**Wie viele Sender können einem Empfänger zugeordnet werden?**  
Einem Empfänger können bis zu 35 Sender zugeordnet werden:  
- 5 Sender mit Ruffunktion  
- 15 Ident-Sender mit Ruf-/Abstellfunktion  
- 15 Sender für Raumfunk

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit:  
1 x Empfänger mit Antenne  
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!  
Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Wieviel Sender müssen einer Rufeinheit angeschlossen werden?**  
Der Sender sendet einen Ruf an den Empfänger, der an eine Rufeinheit angeschlossen ist. Der Empfänger leitet den Ruf an das Rufsystem weiter. Dort erfolgt die softwaregestützte Rufverarbeitung.

**Voraussetzungen für den Betrieb prüfen**  
Stellen Sie vor dem Einsatz eines jeden Geräts sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  
- Der IMA Empfänger für Raumfunk (FN 6864/00) ist an die IMA-Buchse der zugehörigen Rufeinheit angeschlossen.  
- Die Rufeinheit ist an das FN 6000 System angekoppelt.  
- Das FN 6000 Rufsystem ist ordnungsgemäß konfiguriert.

**Ladezustand der Sender-Batterie erkennen**  
Der Ladezustand der Sender-Batterien wird in der Rufeinheit von der Rufanlagen-Management-Software angezeigt. Fragen Sie beim System-Administrator nach.  
- Die Batterie selbst wechseln oder wechseln lassen?  
Schlagen Sie im Kapitel zum betreffenden Sender nach.

**Empfangenen Ruf erkennen und abstellen**  
Der Ruf eines Senders wird durch kurzes Aufblitzen der LED in roter Farbe angezeigt. Danach leuchtet das rote Beruhigungslicht der Rufaste.  
Der Ruf eines Senders mit Abstellfunktion wird durch kurzes Aufblitzen der LED in grüner Farbe angezeigt. Danach leuchtet das rote Beruhigungslicht der Rufaste.  
Zum Abstellen eines Rufs siehe die Betriebsanleitung der zugehörigen Rufeinheit.

**Service-Adresse**  
Wenden Sie sich im Störungs- oder Servicefall an Ihren Händler:

**Konformitätserklärung**  
Alle Geräte entsprechen einschlägigen CE-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

**Was Sie im Servicefall wissen müssen**

**Was Sie über Sicherheit und Umweltschutz wissen müssen**

**Richtiger Umgang mit dieser Gebrauchsanweisung**  
Diese Gebrauchsanweisung dient als Kurz-Referenz zum schnellen Nachschlagen. Beachten Sie die austführliche Original-Betriebsanleitung, die zu jedem Gerät gehört.

**Reparaturen**  
Ein defektes Gerät darf nur vom Hersteller repariert werden.  
Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturversuche durch.

**Umweltschutz**  
Nach Ablauf der Lebensdauer: Geben Sie das Gerät nach regionaler Vorschrift zur getrennten Abfallabammung. Geben Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.


**Was Sie über den Empfänger und über die Sender wissen müssen**

**In Verbindung mit einem der folgenden Sender:**


- Bewegungsmelder** FN 6764/06 mit Funksender FN 6864/06 für Raumfunk
- Trittmatte** FN 6764/05 mit Funksender FN 6864/05 für Raumfunk
- Kontaktmodul** FN 6764/07 mit Funksender FN 6864/07 für Raumfunk

**Technische Daten**  
Abmessungen/Gewicht: 60 x 106 x 16 mm/ca.130 g  
Sendefrequenzabgestrahlte Leistung: 433,920 MHz/<1 mW  
Reichweite (Freifeld): max. 10 m  
Schutzart: IP 30 (nur für trockene Innenräume)  
Spannungsversorgung: eingebaute Lithium-Batterie  
Batterie-Lebensdauer: ca. 2 Jahre (je nach Anzahl der Rufe)  
Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb: -10...+40 °C

**Was Sie über den Empfänger und über die Sender wissen müssen**

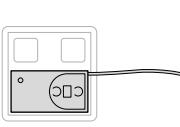

**Was Sie über Sicherheit und Umweltschutz wissen müssen**

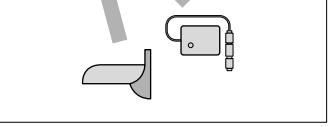

**Richtiger Umgang mit dieser Gebrauchsanweisung**  
Diese Gebrauchsanweisung dient als Kurz-Referenz zum schnellen Nachschlagen. Beachten Sie die austführliche Original-Betriebsanleitung, die zu jedem Gerät gehört.

**Reparaturen**  
Ein defektes Gerät darf nur vom Hersteller repariert werden.  
Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturversuche durch.

**Umweltschutz**  
Nach Ablauf der Lebensdauer: Geben Sie das Gerät nach regionaler Vorschrift zur getrennten Abfallabammung. Geben Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

**Was Sie über den Empfänger und über die Sender wissen müssen**

**In Verbindung mit einem der folgenden Sender:**

- Bewegungsmelder** FN 6764/06 mit Funksender FN 6864/06 für Raumfunk
- Trittmatte** FN 6764/05 mit Funksender FN 6864/05 für Raumfunk
- Kontaktmodul** FN 6764/07 mit Funksender FN 6864/07 für Raumfunk

**Technische Daten**  
Abmessungen: 33 x 55 x 12 mm  
Empfangsfrequenz: 433,920/434,700 MHz  
Reichweite (Freifeld): max. 10 m  
Schutzart: IP 30 (nur für trockene Innenräume)  
Spannungsversorgung: über die Rufeinheit  
Fester Fremdkörper größer als 2,5 mm)

**Gebrauchsanweisung**

**IMA Empfänger für Raumfunk**  
FN 6864/00

In Verbindung mit einem der folgenden Sender:

- Bewegungsmelder** FN 6764/06 mit Funksender FN 6864/06 für Raumfunk
- Trittmatte** FN 6764/05 mit Funksender FN 6864/05 für Raumfunk
- Kontaktmodul** FN 6764/07 mit Funksender FN 6864/07 für Raumfunk

**Service-Adresse**  
Wenden Sie sich im Störungs- oder Servicefall an Ihren Händler:

**Konformitätserklärung**  
Alle Geräte entsprechen einschlägigen CE-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

**Was Sie im Servicefall wissen müssen**

**Service-Adresse**  
Wenden Sie sich im Störungs- oder Servicefall an Ihren Händler:

**Was Sie über den Empfänger und über die Sender wissen müssen**

**Geräte reinigen**  
Reinigen Sie die Geräte bei Bedarf mit einem nebeifeuchten, fusselfreien Tuch.

**Was Sie über den Empfänger und über die Sender wissen müssen**

**Was Sie über den Empfänger und über die Sender wissen müssen**

**Hersteller-Adresse**  
tetronik Kommunikationstechnik GmbH  
Georg-Ohm-Straße 12A  
D 65232 Taunusstein  
Telefon +49 6128 7480-0  
Telefax +49 6128 7480-259  
E-Mail info@tetronik-kt.de  
Internet www.tetronik-kt.de  
Dokument TKC0244b  
Stand 12/2017

**Bewegungsmelder**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf das Gerät eingesetzt werden?**  
Das Gerät ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!

**Wofür wird das Gerät verwendet?**  
Das Gerät erkennt Bewegungen, in seinem Erfassungsbereich und löst einen Ruf im Rufsystem aus.

**Ruf senden**  
Die Trittmatte sendet beim Betreten automatisch einen Ruf. Sendebestätigung: Die LED blinkt 5 mal.

**Batterie einbauen bzw. wechseln**

**tetronik**  
FN6x64/06 

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Basis
- 1 x Lithium-Batterie

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb! Reklamieren Sie bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Wandhalterung verwenden**  
Wenn die räumlichen Gegebenheiten unveränderlich sind, ist es sinnvoll, die Basis fest an die Wand zu montieren.

**GEFAHR**  
Verborgene Leitungen oder Lebensgefahr beim Anbohren von Netzteilen oder Gasrohren. Bohren Sie vor dem Bohren mit Leitungsfinder absuchen.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Basis
- 1 x Lithium-Batterie

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Wandhalterung verwenden**  
Wenn die räumlichen Gegebenheiten unveränderlich sind, ist es sinnvoll, die Basis fest an die Wand zu montieren.

**GEFAHR**  
Verborgene Leitungen oder Lebensgefahr beim Anbohren von Netzteilen oder Gasrohren. Bohren Sie vor dem Bohren mit Leitungsfinder absuchen.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Basis
- 1 x Lithium-Batterie

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Wandhalterung verwenden**  
Wenn die räumlichen Gegebenheiten unveränderlich sind, ist es sinnvoll, die Basis fest an die Wand zu montieren.

**GEFAHR**  
Verborgene Leitungen oder Lebensgefahr beim Anbohren von Netzteilen oder Gasrohren. Bohren Sie vor dem Bohren mit Leitungsfinder absuchen.

**Gerät einschalten und betreiben**

Drücken und halten Sie die "Learn"-Taste. Schalten Sie gleichzeitig das Gerät ein und halten Sie die "Learn"-Taste los. Die LED leuchtet einmal grün und einmal rot auf.

Sobald die LED grün blinkt, lassen Sie die "Learn"-Taste los. Das Gerät ist jetzt 10 Minuten lang im Testmodus.

Merkmal: Die LED blinkt rot.

Bewegen Sie sich im gewünschten Überwachungsbereich. Wenn das Gerät Ihre Bewegung erkennt, ertönt ein Piepton. Richten Sie das Gerät so aus, dass es den gewünschten Überwachungsbereich abdeckt.

Nach 3 Minuten beendet das Gerät automatisch den Testmodus und schaltet auf Betriebsbereitschaft um.

Merkmal: Die LED blitzt im 60-Sekunden-Takt rot. Das Gerät löst jetzt beim Erkennen einer Bewegung einen Ruf im Rufsystem aus.

**Gerät ausschalten**

Schalten Sie das Gerät aus.

Durchdringen Sie die Basis mit einem Stift, um sie vom Netz zu trennen. Sobald die LED leuchtet kurz grün, dann kurzt rot. Dann blitzt sie 60 Sekunden lang im 10-Sekunden-Takt grün.

Merkmal: Die LED einstellig blinkt rot auf.

Wenn das Gerät eine Bewegung erkennt, löst es einen Ruf aus. Danach beginnt eine Funktionspause von 60 Sekunden.

Merkmal: Die LED blitzt im 60-Sekunden-Takt grün. Nach der Funktionspause ist das Gerät wieder betriebsbereit.

Merkmal: Die LED blitzt im 60-Sekunden-Takt rot.

**Gerät räumlich ausrichten**

Hinweis: Das Gerät wird im Testmodus räumlich ausgerichtet. Funktion: Im Testmodus reagiert das Gerät, löst aber keinen Ruf im Rufsystem aus.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

**Kontaktmodul**  
FN 6764/07 mit Funksender  
FN 6864/07 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf das Kontaktmodul eingesetzt werden und wo nicht?**  
Das Kontaktmodul wird an den Kontakt-Ausgang eines externen Fremdegeräts angeschlossen. Beim Schließen des Kontakts löst das Kontaktmodul einen Ruf im Rufsystem aus.

**Wofür wird das Kontaktmodul verwendet?**  
Das Kontaktmodul ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt.

**Das Kontaktmodul darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Kontaktmodul mit Anschlusskabel und Leitungsverbinder
- 1 x Lithium-Batterie

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Standgerät verwenden**  
Wenn das Gerät unter wechselnden räumlichen Gegebenheiten eingesetzt werden soll, muss die Basis mobil bleiben und als Standgerät verwendet werden.

**Funktest**  
Führen Sie den Funktest zunächst bei abgeklemmtem externen Kontakt und bei geöffnetem Gehäuse durch. Drücken Sie die Test-Taste. Sendebestätigung: Die LED blinkt 5 mal. Der Ruf muss vom Rufsystem erkannt werden. Wiederholen Sie den Funktest vom angeschlossenen externen Gerät aus.

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Funksender einbauen**  
Setzen Sie den Funksender richtig herum in die Aussparung der Trittmatte ein. Drücken Sie fest auf beide Druckknöpfe, bis sie hörbar einrasten.

**Batterie einbauen bzw. Batterie wechseln**  
Batterietyp: CR2430 3,0 V

Drehen Sie die 4 Schrauben heraus und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.

Entfernen Sie die 2 Schrauben und 2 Scheiben. Schwenken Sie die Platine nach oben.

Setzen Sie die Batterie ein. Achten Sie auf richtige Polung. Montieren Sie die Platine. Montieren Sie den Gehäusedeckel. Achten Sie auf die richtige Position des LED-Fensters.

**Technische Daten**  
Abmessungen/Gewicht: 1.100 x 700 x 10 mm/ca. 9 kg  
Sendefrequenz/abgestrahlte Leistung: 433,920 MHz/<1 mW  
Reichweite (Freifeld): max. 10 m  
Schalldruck: min. ca. 20 kg  
Schutzart: IP 54  
Spannungsversorgung: eingebaute Lithium-Batterie  
Batterie-Lebensdauer: ca. 2 Jahre (je nach Anzahl der Rufe)  
Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb: -10...+40 °C

**Trittmatte am Empfänger anmelden**  
Siehe Rückseite: "Empfänger ... | Sender anmelden".

**Funktion testen**  
Abmessungen Gehäuse: 50 x 31 x 65 mm  
Kabellänge inkl. Leitungsverbinder: 270 mm  
Gewicht: ca. 69 g  
Sendefrequenz: 433,920 MHz  
Abgestrahlte Leistung: <1 mW  
Reichweite (Freifeld): max. 10 m  
Schutzart: IP 54  
Spannungsversorgung: Batterie CR2430 3,0 V  
Batterie-Lebensdauer: ca. 2 Jahre  
(je nach Anzahl der Rufe)

Zulässiger Temperaturbereich im Betrieb: -10...+40 °C

**Externe Kontakt anschließen**  
Kontak: Arbeitskontakt, potentiellfrei (ohne Fremdspannung)  
Drehen Sie die Überwurfmutter vom Leitungsverbinder ab.  
Manteln Sie das Kabel auf eine Länge von 40 mm ab.

1 Führen Sie das Kabel bis zum Anschlag durch die Überwurfmutter.  
2 Legen Sie die Adern in die Fächer Weiß und Schwarz.  
3 Winkeln Sie die abgewinkelten Adern auf 2 mm Länge.  
4 Kürzen Sie die Überwurfmutter auf. Anzugsdrehmoment: 1,2 Nm.  
Dabei wird Kontakt hergestellt, und die Zugentlastung schließt sich.

**Kontaktmodul**  
FN 6764/07 mit Funksender  
FN 6864/07 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf das Kontaktmodul eingesetzt werden und wo nicht?**  
Das Kontaktmodul wird an den Kontakt-Ausgang eines externen Fremdegeräts angeschlossen. Beim Schließen des Kontakts löst das Kontaktmodul einen Ruf im Rufsystem aus.

**Wofür wird das Kontaktmodul verwendet?**  
Das Kontaktmodul ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt.

**Das Kontaktmodul darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Kontaktmodul mit Anschlusskabel und Leitungsverbinder
- 1 x Lithium-Batterie

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie wird an die Ausstiegseite eines Betts gelegt oder in Durchgängen platziert.

**Die Trittmatte darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!**

**Wofür wird die Trittmatte verwendet?**  
Die Trittmatte dient der Rufaussendung beim Betreten durch Bewohner bzw. Patienten.

**Lieferumfang prüfen**  
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschafftheit:

- 1 x Trittmatte
- 1 x Funksender
- 1 x Empfänger

Bei beschädigten oder fehlenden Teilen: Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten!

**Basis als Trittmatte**  
FN 6764/05 mit Funksender  
FN 6864/05 für Raumfunk

**Gerät zuordnen**  
Stellen Sie anhand des Typschildes sicher, dass dieses Kapitel zu Ihrem Gerät gehört.

Dieses Kapitel gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese scheinbar baugleich sind oder ähnlich aussehen.

**Wo darf die Trittmatte eingesetzt werden und wo nicht?**  
Die Trittmatte ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich bestimmt. Sie